

SUPERFLEX NUTOUCH - Cor AMARELA - PRETA

REGISTRO ANVISA.:	80841790001	Certificado de Aprovação INMETRO - MTE(CA).:	C.A 28.280	NCM.:	3926.20.00
RESPONSÁVEL TÉCNICO.:	Renato Peres da Silva	CRQ.:	09301448-IX		

IMPORTADO E DISTRIBUIDOR POR.:	First Import Comercio Internacional Ltda. - EPP CNPJ: 11.232.867/0001-99 Av. Rocha Pombo, 2561 SALA 1 - MOD 5, Águas Belas, São José dos Pinhais-PR. Cep: 83.010-620 AFE Nº: 8.08.417-9
--------------------------------	--

NOME DO PRODUTO.:	SuperFlex Sem Pó
DESCRIÇÃO DO PRODUTO.:	LUVA DE VINIL COLORIDA (AMARELA - PRETA) PARA PROCEDIMENTOS NÃO-CIRÚRGICOS, PROTEÇÃO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS.

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO.:	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO SEM PÓ SUPERFLEX é 100% confeccionada em policloreto de vinila (PVC) sintético.
-------------------------	--

INDICAÇÃO DE USO.:	A LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO SEM PÓ SUPERFLEX é utilizada na proteção do profissional de saúde nos procedimentos não invasivos, protegendo contra agentes biológicos (bactérias, vírus e outros) testadas e aprovadas - C.A INMETRO MTE - 28.280 , oferecendo o máximo conforto e com maior liberdade dos movimentos. Também, são indicadas para profissionais das áreas alimentícia, estética, frigorífica, doméstica, industrial, limpeza e outros procedimentos em que não haja contatos com fluidos corpóreos passíveis de contaminação.
--------------------	---

INSTRUÇÕES DE USO.:	A LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO SEM PÓ SUPERFLEX é utilizada para proteção das mãos do profissional, caracterizando-se como um produto descartável de uso único. Para utilização correta do produto: 1. Verifique o tamanho da luva correto para a sua mão. 2. Lavar e secar bem as mãos antes de colocar a luva, retirando anéis e outros acessórios. Para colocar as luvas, siga as orientações descritas abaixo: - Retire a luva da caixa (embalagem primária). - Pegue a luva pela borda do punho. - Coloque a primeira luva. - Pegue a outra luva com a mão enluvada. - Coloque a segunda luva. - Com as mãos enluvadas não toque em nada que não esteja na indicação de uso definida. Para retirar as luvas, siga as orientações descritas abaixo: - Segure uma luva pela parte externa, na altura do punho, com auxílio do polegar puxe em direção à ponta dos dedos assim a luva sairá do avesso. - Segure a luva removida com a outra mão enluvada. Coloque os dedos da mão não enluvada na parte interna da luva (entre a luva e o punho). Remova a segunda luva, arrastando-a em direção à ponta dos dedos e da outra luva. - Descarte as luvas no local indicado e lave as mãos com água e sabão.
---------------------	---

ADVERTÊNCIAS.:	- PRODUTO DE USO MÉDICO. - PRODUTO DE USO ÚNICO. DESCARTAR APÓS O USO. - PROIBIDO REPROCESSAR. - PRODUTO NÃO ESTÉRIL. - Este produto não contém substâncias conhecidas ou suspeitas que possam causar danos ao usuário, em especial borracha natural (látex)- não ocasionando, portanto, reações alérgicas nos usuários. - NÃO utilize a LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO SEM PÓ SuperFlex caso apresente qualquer tipo de avaria.
----------------	--

PRECAUÇÕES.:	- Antes de utilizar o produto, realize uma inspeção rigorosa. Caso seja observada qualquer não conformidade, não deverá ser utilizado. - Antes de realizar a lavagem das mãos, retire anéis e acessórios.
--------------	---

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO.:	Cartucho com 100 unidades -- Caixa Máster com 10 Cartuchos
---------------------------	---

CONTRA INDICAÇÕES.:	Não há.
---------------------	---------

VALIDADE DO PRODUTO.:	5 ANOS APÓS DATA DE FABRICAÇÃO
-----------------------	--------------------------------

SUPERFLEX NUTOUCH - Cor AMARELA - PRETA

REGISTRO ANVISA.:	80841790001	Certificado de Aprovação INMETRO - MTE(CA).:	C.A 28.280	NCM.:	3926.20.00
RESPONSÁVEL TÉCNICO.:	Renato Peres da Silva		CRQ.:	09301448-IX	
IMPORTADO E DISTRIBUIDOR POR.:	First Import Comercio Internacional Ltda. - EPP				
	CNPJ: 11.232.867/0001-99 Av. Rocha Pombo, 2561 SALA 1 - MOD 5, Águas Belas, São José dos Pinhais-PR. Cep: 83.010-620 AFE Nº: 8.08.417-9				

FABRICANTE.:	SHANDONG BLUE SAIL PLASTIC & RUBBER CO. LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
--------------	--

IMPORTADO E DISTRIBUIDOR POR.:	First Import Comercio Internacional Ltda. - EPP CNPJ: 11.232.867/0001-99 Av. Rocha Pombo, 2561 SALA 1 - MOD 5, Águas Belas, São José dos Pinhais-PR. Cep: 83.010-620 AFE Nº: 8.08.417-9
--------------------------------	--

Caixa Primária Confeccionada em Papelão Ondulado - Contém 10 cartuchos
Medidas Caixa Máster - Compr. 34cm X Larg. 25cm X Altura 24cm

IMAGEM CAIXA MÁSTER.:



Caixa Primária Confeccionada em Papel Cartão - Cartucho com 100 luvas
Medidas Cartucho - Compr. 23cm X Larg. 12cm X Altura 7cm

IMAGEM CARTUCHO.:



SUPERFLEX NUTOUCH - Cor AMARELA - PRETA

REGISTRO ANVISA.:	80841790001	Certificado de Aprovação INMETRO - MTE(CA).:	C.A 28.280	NCM.:	3926.20.00
RESPONSÁVEL TÉCNICO.:	Renato Peres da Silva		CRQ.:	09301448-IX	
IMPORTADO E DISTRIBUIDOR POR.:	First Import Comercio Internacional Ltda. - EPP				
	CNPJ: 11.232.867/0001-99 Av. Rocha Pombo, 2561 SALA 1 - MOD 5, Águas Belas, São José dos Pinhais-PR. Cep: 83.010-620 AFE Nº: 8.08.417-9				

REGISTRO ANVISA**Consultas**

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	First Import Comercio Internacional Ltda. - EPP
CNPJ	11.232.867/0001-99
Autorização	8.08.417-9
Produto	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO SEM PÓ VINYL FLEX

Modelo Produto Médico
Classic Saúde cor transparente (PP, P, M, G, GG); SuperFlex cor branca (PP, P, M, G, GG); FlexiPlus cor azul (PP, P, M, G, GG)

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Instruções de uso luvas modelo - sem pó.pdf	1898246211 - 17/05/2021 09:56:20

Nome Técnico	Luvas Descartaveis
Registro	80841790001
Processo	25351020943201480
Fabricante Legal	SHANDONG BLUE SAIL PLASTIC & RUBBER CO. LTD
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	[sem dados cadastrados]
Data de Publicação	[sem dados cadastrados]

[Consulte aqui ANVISA](#)

SUPERFLEX NUTOUCH - Cor AMARELA - PRETA

REGISTRO ANVISA.:	80841790001	Certificado de Aprovação INMETRO - MTE(CA).:	C.A 28.280	NCM.:	3926.20.00
RESPONSÁVEL TÉCNICO.:	Renato Peres da Silva		CRQ.:	09301448-IX	
IMPORTADO E DISTRIBUIDOR POR.:	First Import Comercio Internacional Ltda. - EPP CNPJ: 11.232.867/0001-99 Av. Rocha Pombo, 2561 SALA 1 - MOD 5, Águas Belas, São José dos Pinhais-PR. Cep: 83.010-620 AFE Nº: 8.08.417-9				

Certificado de Aprovação INMETRO - MTE(CA) 28.280

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 28.280
VÁLIDO

Validade: 04/08/2026

Nº. do Processo: 19966.100966/2021-07

Produto: Importado

Equipamento: LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO-CIRÚRGICOS

Descrição: Luva para procedimentos não cirúrgicos, confeccionada em polímero de vinila, lisa, ambidestra, não estéril, sem pó. Fabricante: BLUE SAIL MEDICAL CO., LTD. China.

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS.

Restrições/Limitações: LUVA DESCARTÁVEL. NÃO UTILIZAR PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS.

Observação: Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XXXII, disponível no link "<https://sit.trabalho.gov.br/portal/index.php/seguranca-e-saude-no-trabalho/comunicados-epi?view=default>".

Marcação do CA: Na embalagem

Referências: Luva para procedimentos não cirúrgicos - CLASSIC + SAÚDE SEM PÓ.

Tamanhos: P, M, G, GG

Cores: Transparente

Normas técnicas: ABNT NBR ISO 11193-2:2013

Laudos:

Nº. Laudo: ELA/L-339355/21 - CONS

Laboratório: L. A. FALCÃO BAUER - CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE QUALIDADE LTDA

Empresa: FIRST IMPORT COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

CNPJ: 11.232.867/0001-99 CNAE: 4642 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios

Endereço: ROCHA POMBO 2561 SALA 1 - MOD 5 COND PORTAL AEROPORTO

Bairro: AGUAS BELAS

Cidade: SAO JOSE DOS PINHAIS

CEP: 83010620

UF: PR

Consulte aqui CA

